

ballidoo

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΡΙΝΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Ανοίξτε την υποδοχή των μπαταριών και τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες LR06 με το σωστό τρόπο. Στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Η συσκευή περιλαμβάνει 2 ακροφύσια, ένα για βρέφη (0-3 μηνών) και ένα μεγαλύτερο για μωρά (3 μηνών και άνω).


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

- **Επίπεδο 1: Πορτοκαλί φως**, για ήπια ρινική συμφόρηση (πατάμε 1 φορά το κουμπί).
- **Επίπεδο 2: Μπλε φως**, για έντονη ρινική συμφόρηση (πατάμε 2 φορές το κουμπί).

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, η μπλε λυχνία αναβοσβήνει.

ΑΝΑΡΡΟΦΗ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ


Τοποθετήστε το ακροφύσιο σιλικόνης **(3)** στην είσοδο του ρουθουνιού χωρίς να αφήσετε κενό μεταξύ του ρουθουνιού και του ακροφυσίου. Ρουφήξτε για λίγα δευτερόλεπτα. Οι εκκρίσεις μαζεύονται στον συλλέκτη εκκρίσεων **(6)**. Προσέξτε να μην ρουφάτε τα τοιχώματα του ρουθουνιού. Μπορείτε να επαναλάβετε τη λειτουργία όσες φορές χρειάζεται.

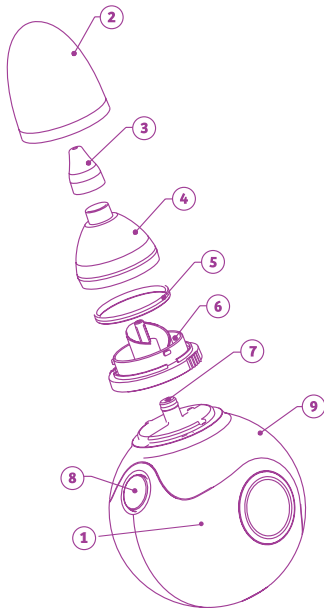

- 1 Σώμα συσκευής
- 2 Καπάκι
- 3 Ακροφύσιο σιλικόνης
- 4 Διαφανές καπάκι
- 5 Κύλινδρος σιλικόνης
- 6 Συλλέκτης εκκρίσεων
- 7 Χώρος εκκένωσης των εκκρίσεων
- 8 Ηλεκτρικός διακόπτης
- 9 Μπαταρίες

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α)

Τραβήξτε το ακροφύσιο σιλικόνης (3), ξεβιδώστε το διαφανές καπάκι (4), αφαιρέστε τον συλλέκτη εκκρίσεων (6) για να τον διαχωρίσετε από το σώμα της συσκευής (1), ελέγξτε ότι ο κύλινδρος σιλικόνης είναι σωστά τοποθετημένος (5), βιδώστε και συναρμολογήστε.

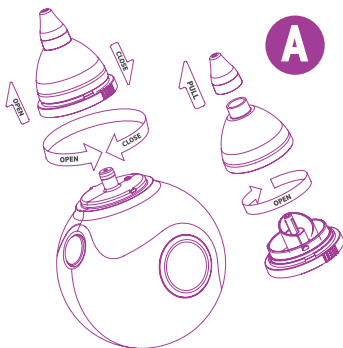

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Αφαιρέστε το τερματικό τμήμα από τη συσκευή (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α) και ξεπλύνετε τα διάφορα μέρη με κρύο νερό. Αποστειρώνετε με κρύο νερό. Μην αποστειρώνετε σε φούρνο μικροκυμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ 1: 47 kpa / ΕΠΙΠΕΔΟ 2: 54 kpa

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΧΟΥ: ΕΠΙΠΕΔΟ 1: 62 dB / ΕΠΙΠΕΔΟ 2: 65 dB

Περιέχει δύο μπαταρίες LR06 - AA 1.5V, δύο ακροφύσια, ανταλλακτικό κύλινδρο σιλικόνης και προστατευτικό καπάκι.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να κρατάτε το άλλο ρουθούνι κλειστό κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης.
- Χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αποσυρθούν οι εκκρίσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα ρουθούνια είναι ερεθισμένα.
- Συνιστάται να ξεπλύνετε το τμήμα του τερματικού με κρύο νερό μετά από κάθε χρήση.
- Διατηρήστε το προϊόν σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αρκετούς μήνες, συνιστάται η αφαίρεση των μπαταριών.
- Η ηλεκτρική συσκευή ρινικής απόφραξης Ballidoo βοηθά στην πρόληψη αναπνευστικών επιπλοκών. Σε περίπτωση μόλυνσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Το Ballidoo έχει σχεδιαστεί για την αναρρόφηση των ρινικών εκκρίσεων των βρεφών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία άλλη περίπτωση.
- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα διάφορα εξαρτήματα είναι σωστά συναρμολογημένα.
- Μην πιέζετε το ακροφύσιο στο ρουθούνι του μωρού.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με το κάλυμμα μπαταριών ανοιχτό.
- Μην ξεβιδώνετε τις βίδες καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε με διαλύτες ή λιπαντικά.